



INSTRUCTIONS FOR USE

Medical Mouth and Nose Protector



1



2



3



Bedecken Sie mit der Maske Mund und Nase und ziehen Sie die elastischen Bänder über die Ohren.

Einmalgebrauch. Maximale Tragedauer: 4h



Cover your mouth and nose with the mask and pull the elastic straps over your ears.

Single use. Maximum wearing time: 4h



Couvrez votre bouche et votre nez avec le masque et tirez les sangles élastiques sur vos oreilles.

Usage unique. Durée maximale de port : 4h



Cúbrase la boca y la nariz con la máscara y tire de las correas elásticas sobre las orejas.

De un solo uso. Tiempo máximo de uso: 4h



Copriti la bocca e il naso con la maschera e tira gli elastici sulle orecchie.

Uso singolo. Tempo massimo di usura: 4h

Ziehen Sie die Maske so auseinander, dass sie über Nase und Kinn fixiert ist und Mund und Nase sicher bedeckt.

Pull the mask apart so that it is fixed over the nose and chin and securely covers the mouth and nose.

Séparez le masque de manière à ce qu'il soit fixé sur le nez et le menton et qu'il recouvre solidement la bouche et le nez.

Separe la máscara para que quede fijada sobre la nariz y el mentón y cubra de forma segura la boca y la nariz.

Separare la maschera in modo che sia fissata sopra il naso e il mento e copra saldamente la bocca e il naso.

Passen Sie die Nasenklammer mit den Fingern durch Drücken Ihrem Gesicht an. Nutzen Sie hierfür beide Hände.

Use your fingers to adjust the nose clip to your face by squeezing. Use both hands for this.

Utilisez vos doigts pour ajuster le pince-nez à votre visage en serrant. Utilisez les deux mains pour cela.

Use sus dedos para ajustar la pinza nasal a su cara apretando. Use ambas manos para esto.

Usa le dita per regolare la clip per il naso al tuo viso stringendo. Usa entrambe le mani per questo.